



as human, for human
PARAMOUNT BED

非装着・非侵襲の体動センサー




眠りSCAN

「眠りSCAN」を利用した入居者の見守り支援と 個別ケアへの活用〈睡眠・覚醒と在床・離床を見える化〉

眠りSCAN (NN-1120) 一般医療機器 届出番号 12B1X10020000125
眠りSCAN (NN-1520) 一般医療機器 届出番号 12B1X10020000126



マットレスの下に
敷くだけ!

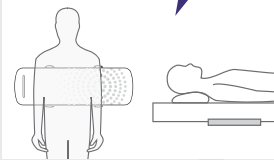


パソコンや
携帯端末で確認!



POINT 01 目の行き届いた見守り・タイムリーなケア

ベッド上の利用者様の状態をリアルタイムでモニタリングできます。利用者様の状態(睡眠・覚醒・起き上がり・離床)が変わったときや、呼吸数・心拍数が設定した条件になったときに、PCや携帯端末に通知することも可能です。^{*1}

▼リアルタイムモニター

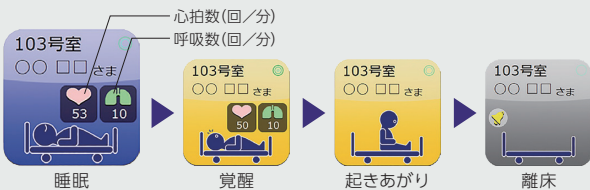


POINT 02 生活状況の見える化・体調変化の気づき

一人ひとりの睡眠状況を把握することができます。また、利用者様の呼吸数、心拍数(いずれも推定値)の長期的変動を日誌として一覧できます。^{*2}

▼睡眠日誌



▼呼吸日誌

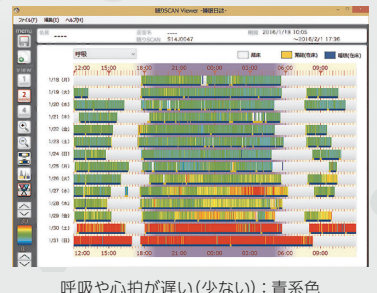

呼吸や心拍が遅い(少ない): 青系色
呼吸や心拍が速い(多い): 赤系色

^{*1} 眠りSCANは、体動を検出するためのセンサーであり、生命に関わる環境下での監視には使用できません。また、呼吸・心拍数は、体動から検出した推定値です。寝返りなどの大きな体動が多いなど、状況によって呼吸・心拍を検出できない場合があります。生命に関わる監視装置としての性能・機能は有していません。
^{*2} 眠りSCANは、疾病の診断をおこなえる機器ではありません。測定結果で体調変化に気づいた場合は医師の指示に従ってください。

パラマウントベッド株式会社

本社: ☎03-3648-1111(大代)
〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号
URL: www.paramount.co.jp

東京支店 ☎03-3648-1171(代)
札幌支店 ☎011-271-1181(代)
仙台支店 ☎022-239-5211(代)
さいたま支店 ☎048-852-0707(代)
横浜支店 ☎042-795-8800(代)

名古屋支店 ☎052-963-0600(代)
大阪支店 ☎06-6443-8791(代)
高松営業所 ☎087-881-8900(代)
広島支店 ☎082-293-1311(代)
福岡支店 ☎092-461-1131(代)